

3D-PRÄZISIONSHARZE  
**KEYSPLINT Soft®**  
by Keystone Industries

# Reinigungs- und Pflegehinweise für Behandler und Patient

Um eine lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort zu gewährleisten, sind die Reinigungs- und Pflegehinweise auf der folgenden Seite unbedingt zu beachten. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Behandler.



# WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG!

Um eine Bruchgefahr Ihrer Aufbissschiene zu vermeiden, legen Sie diese bitte vor jedem Tragen für mindestens 20 Sek. in ca. 45° C warmes Wasser!

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG VON KEYSPLINT SOFT

### 1. Tägliche Reinigung

Keystone Industries empfiehlt, Ihre Schiene täglich vor und nach jedem Tragen zu reinigen. Entfernen Sie Speichel und Rückstände von der Schiene unmittelbar nach dem Herausnehmen mit warmen Wasser (nicht heißer als 45°C) und etwas Seife.

### 2. Verwendung von Reinigungsmitteln

Für die regelmäßige Entfernung von Rückständen und die Reinigung Ihrer Schiene können Sie schonende, freiverkäufliche Reinigungsmittel verwenden, die speziell für die Reinigung von Dentalvorrichtungen angeboten werden. Bei Bedarf können sie außerdem einen weichen Borstenpinsel nutzen, um die Innenseiten Ihrer Schiene von Rückständen zu befreien. Zu den geeigneten Reinigungsmitteln zählen Geschirrspülmittel, Corega-Tabs, Efferdent, 3% Peroxid Lösung, 15% Bleichmittellösung und Mundwasser. Bitte seien Sie im Umgang mit Ihrer Keysplint Soft Schiene stets vorsichtig. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schiene völlig trocken ist, bevor Sie sie in der Schale lagern. Nur so können Sie der Bakterienbildung vorbeugen.

### 3. Vorsichtsmaßnahmen

- Lassen Sie Ihre Schiene NIE LÄNGER als 1 Stunde in einer Reinigungsflüssigkeit
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit Schleifkörpern (z.B. Zahnpasta)
- Entsorgen Sie die Reinigungslösung nach jeder Nutzung.
- Spülen Sie die Schiene vor dem Tragen gründlich ab.

Keystone Industries rät vom Essen und Trinken mit eingesetzter Schiene ausdrücklich ab. Der Verzehr heißer Getränke könnte die Passform der Vorrichtung beeinträchtigen. Bitte nehmen Sie die Vorrichtung vor jeder Mahlzeit heraus, um eine optimale Leistung, Passform und lange Lebensdauer zu gewährleisten.